


Инструкция по подключению сканера Medit к лаборатории Star Smile

Уважаемый доктор, чтобы подключить внутриротовой сканер Medit к лаборатории Star Smile вам необходимо:

1. Зайдите в Medit link
2. В разделе “Партнеры” (Partners) найдите StarSmile Lab
3. Откройте карточку пользователя StarSmile Lab
4. Нажмите “Запросить партнерство”
5. После подтверждения партнерства в разделе Case Vox выберите сканы для отправки и нажмите на иконку “Поделиться” 
6. Укажите в настройках отправки “Поделиться с определенными людьми-мой партнер-StarSmile Lab”
7. **Важно:** при сканировании обязательно укажите корректные данные пациента (ФИО), чтобы мы смогли идентифицировать сканы

При оформлении заказа в личном кабинете Star Smile укажите модель сканера и ID скана.

Инструкция по подключению сканера Dentsply Sirona к лаборатории Star Smile

Уважаемый доктор, чтобы подключить внутриротовой сканер Dentsply Sirona к лаборатории Star Smile вам необходимо:

Через Sirona Connect Portal:

1. Зайдите в раздел “Получатели” и нажмите на +
2. Нажмите на “Поиск получателей” и найдите лабораторию Star Smile
3. В строке с данными о лаборатории нажмите на +

Через сайт Sirona Connect:

1. В разделе “Партнеры” выберите пункт “Избранные получатели”
2. Нажмите на “Поиск получателей” и найдите лабораторию Star Smile
3. В строке с данными о лаборатории нажмите на +

После успешного подключения, лаборатория Star Smile появится вверху списка “Партнеров”

При оформлении заказа в личном кабинете Star Smile укажите модель сканера и ID скана.